

Preguntas frecuentes

¿Puedo bañarme o nadar con el Cardea SOLO?

¡NO! Si se entra debajo del agua o se satura en agua, la grabación puede detenerse.

Tengo una resonancia magnética programada durante mi período de uso, ¿está eso bien?

¡No! Consulte a su contacto del estudio si necesita un procedimiento de resonancia magnética o tiene uno programado durante su período de uso.

¿Puedo usar el Cardea SOLO durante las radiografías de diagnóstico?

¡Sí! Cardea SOLO es seguro de usar durante las radiografías, como las radiografías dentales; sin embargo, consulte a su contacto del estudio con respecto a las radiografías y los procedimientos de imágenes planificados específicos.

¿Puedo usar el Cardea SOLO en la seguridad del aeropuerto?

¡Sí! El Cardea SOLO no interferirá con los equipos de seguridad. El personal de seguridad puede inspeccionar el área del Cardea SOLO. Usted no necesitará una carta del médico mientras viaja usando Cardea SOLO.

¿Qué pasa si mi sensor se cae antes del final del estudio de siete días?

Si el sensor se cae antes del final del estudio de siete días y usted no puede volver a colocarlo, escriba la fecha y la hora en que el sensor se cayó en el exterior de la bolsa del sensor original. Luego, devuelva el sensor en el sobre prepago lo antes posible.

Mi Cardea SOLO duele, ¿debo mantenerlo?

¡NO! Si experimenta hinchazón, enrojecimiento, sarpullido, sensibilidad, picazón SEVERA o piel agrietada alrededor o debajo del Cardea SOLO, retírelo inmediatamente y consulte a su contacto del estudio lo antes posible para recibir instrucciones.



CONTACTO

Pregúntele a su contacto del estudio sobre cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de Cardea SOLO:

Nombre del Contacto

Número de Teléfono



Cardiac Insight, Inc. Todos los derechos reservados.
VERSIÓN BETA SOLO PARA USO DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Todo Sobre Cardea SOLO™

Consejos Útiles Para La Grabación De Un Electrocardiograma Exitoso



Consejos para usar Cardea SOLO



EVITE ducharse durante las primeras 24 horas



Tome duchas breves, de espaldas al chorro de agua.



No use lociones, aceites o polvos alrededor del Cardea SOLO



Presione el botón marcador para notar si usted experimenta algo estresante



Evite cualquier actividad que le cause sudor excesivo.

Cardea SOLO no monitorea ni transmite remotamente su ritmo cardíaco.

Consulte con su contacto del estudio si usted tiene alguna pregunta o inquietud sobre el uso de este aparato del estudio.

Si usted tiene una emergencia médica, llame al 911.

Retirar el Cardea SOLO

Usted puede quitarse el sensor después de su séptima y última encuesta.

Por favor retire el monitor cardíaco el:



Fecha

después de



Hora de la encuesta por teléfono

1. Lávese y séquese bien las manos.
2. Retire la toallita removedora de adhesivo.



Consejo: Usted también puede usar vaselina o aceite para bebés.

3. Use la toallita removedora de adhesivo para limpiar alrededor de los bordes del sensor SOLO. Levante suavemente y retire lentamente el sensor SOLO de su piel. Sostenga su piel hacia abajo con la mano opuesta para evitar lesiones en la piel.



4. Limpie la piel con un jabón suave y agua para eliminar cualquier adhesivo que pueda quedar.
5. Es normal tener un ligero enrojecimiento y olor en la piel después de retirarlo. El mismo debe desaparecer después de unos días. Si el enrojecimiento con picazón continúa o empeora, o si tiene alguna inquietud sobre la apariencia o condición de su piel, comuníquese con: Teléfono del CENTRO



Devolviendo el Cardea SOLO

1. Después de quitarse el sensor SOLO, doble las dos alas por debajo del medio.



2. Vuelva a colocar su sensor SOLO doblado en su bolsa original y vuelva a sellar.
3. Coloque la bolsita en el sobre de correo del **Servicio Postal de Estados Unidos** con la dirección y el pago por adelantado. Ponga el sobre en cualquier buzón azul del Servicio Postal de los Estados Unidos o entrégueselo al cartero.

